

FICHA TÉCNICA – FLAMIACTIV®

Nome Comercial: FlamiActiv

Forma Farmacêutica: Gel para uso tópico

Classificação: Dispositivo médico Classe II

Registro ANVISA: Hydro: 81706719003

Descritivo

Gel coloidal hidroativo para o tratamento de feridas secas ou úmidas, feridas leves e feridas superficiais abertas. Utilizado também após a laserterapia e em queimaduras superficiais, como queimaduras de primeiro grau, incluindo aquelas causadas por radioterapia. Composto de Metil-p-hidroxibenzoato, propil-p-hidroxibenzoato, EDTA dissódico, cetearil policarbonato (líquido), cetearil policarbonato (sólido), copolímero de poliacrilato, L-arginina, PEG 400 e água purificada.

Composição

- Metil-p-hidroxibenzoato
- Propil-p-hidroxibenzoato
- EDTA dissódico
- Cetearil policarbonato (líquido)
- Cetearil policarbonato (sólido)
- Copolímero de poliacrilato
- L-arginina
- PEG 400
- Água purificada.

Indicações

Exemplos de uso: radiodermatite, lesão periestoma, queimadura solar e de primeiro grau, pós laserterapia, crioterapia e peeling, dermatites associadas à incontinência, dermatites atópicas e de contato, feridas leves (arranhões, lacerações, cortes), lesões superficiais abertas e tecido desvitalizado.

Propriedades

- Cria um ambiente úmido ideal para a ferida
- Refresca e alivia a dor

- Cria uma barreira protetora com efeito bacteriostático
- Acelera a renovação celular
- Promove a dissolução de tecido necrótico/danificado
- Diminui o tempo de cicatrização
- Reduz o risco de cicatrizes

Modo de Uso

- Limpar a ferida
- Aplicar camada de 2–5 mm diretamente sobre a ferida de 1 a 6 vezes ao dia
- Se necessário, cobrir com um curativo estéril não aderente e trocar diariamente

Contraindicações

- Não utilize FlamiActiv® caso tenha histórico de reação alérgica a qualquer um dos ingredientes (ver composição).

Efeitos Adversos

- Efeitos colaterais como irritações ou reações alérgicas são muito raros, mas podem ocorrer. Interrompa imediatamente o uso de FlamiActiv® caso ocorra irritação ou alergia.

Advertências e Precauções

- Apenas para uso externo.
- FlamiActiv® não deve ser usado nas pálpebras ou nos olhos. Caso entre em contato com os olhos, lave-os abundantemente com água corrente e consulte um médico.
- Em feridas com secreção extensa ou infectadas, consulte um médico antes de usar FlamiActiv®, pois outros tratamentos complementares podem ser necessários.
- Se a ferida ficar inchada, vermelha ou dolorida (especialmente em casos de radiodermatite), ou não começar a cicatrizar em alguns dias, procure orientação médica.
- Não utilize este produto se notar que ele foi danificado ou aberto acidentalmente antes do uso.
- Na ausência de dados provenientes de estudos clínicos, não utilizar em mulheres grávidas ou em período de amamentação.
- Não utilize em combinação com outros tratamentos para feridas.

Armazenamento

- Temperatura ambiente ($\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Validade: ver embalagem (mês/ano)

- Após aberto: 12 meses

Apresentação Comercial

- Tubo: 50g

Fabricante

- Flen Health NV / Blauwesteenstraat 87, 2550 Kontich, Bélgica / www.flenhealth.com

Importador no Brasil

- TR Farma Medicamentos Ltda

